

ÓRTESIS SACRO LUMBAR (OSL)

El dispositivo de respaldo o corrección tipo Corsé u Órtesis Sacro Lumbar (OSL), estilo de corsé que está disponible de manera inmediata, diseñado para apoyar y estabilizar su columna vertebral. Existen varios modelos y entre ellos, podemos señalar, el Respaldo California, el Respaldo de Tres Puntos o Tri-Mod, la Órtesis de Inmovilización Lumbar Miami y la Órtesis de Medio Perfil. Estos dispositivos protésicos se usan para ayudar a corregir o superar una serie de patologías de la columna vertebral que requieren inmovilización o liberación de la tensión o presión que puede afectar a la espina dorsal de un individuo o paciente. Esta órtesis lo debe utilizar solo el paciente que tenga alguna condición física o malformación diagnosticada y de acuerdo a prescripción médica.

Procedimiento De Aplicación Y Uso

1. Póngase una camiseta apropiada.
2. Desprenda el Velcro en el costado derecho del panel anterior (delantero).
3. Para su uso correcto y efectivo, póngase de espalda en una superficie plana.
4. Esto permitirá que rebaje la tensión abdominal para mayor comodidad. Coloque y acomode la órtesis bajo su espalda, de modo que el panel posterior quede centrado.
5. Centre y acomode el panel anterior (delantero) en su cuerpo.
6. Asegure bien el Velcro. Si es necesario, (re) ajuste la órtesis hasta que la sienta cómoda y bien apegada a su cuerpo.
7. Alcance la manilla de compresión en el (los) costado(s) de la órtesis y tire en dirección opuesta al tronco de su cuerpo. Fije y asegure la manilla al panel anterior o delantero o al Velcro en costado opuesto. La manilla de compresión se puede tensar o soltar dependiendo de su nivel de comodidad. Recuerde, no obstante, que la órtesis Provee mayor apoyo cuando está bien ajustada.

Remoción del dispositivo

1. Libere y suelte la manilla de compresión hacia el costado de la órtesis de donde originalmente se ajustó.
2. Libere el Velcro en un costado del dispositivo y proceda a quitar la órtesis.

Instrucciones Para Su Uso

Estos corsés protésicos OSL generalmente se usan cuando Ud. permanece sentado, de pie o durante su trajín diario y desplazamiento. En algunos casos, podrá ser necesario que incluso duerma con el corsé. La órtesis se debe usar según las indicaciones de su médico.

Cuidado Y Mantenición

La cobertura de espuma en el panel posterior se puede remover para su limpieza. Lávelo a mano con un detergente suave y enjuáguelo bien. Póngalo en una superficie plana y seque al aire libre. No utilice una lavadora o secadora de ropa. El panel anterior o delantero se puede limpiar con un paño húmedo. Asegúrese que la órtesis esté completamente seca antes de utilizarla nuevamente.

Si tiene preguntas, por favor póngase en contacto con la oficina de WESTCOAT BRACE & LIMB mas cercana para consultar con un Técnico Ortopédico.



North Tampa
(Corporate Office)
5311 E. Fletcher Ave
Tampa, FL 33617
813-985-5000

Palm Harbor
3343 Tampa Road Palm
Harbor, FL 33684
727-785-0100

West Tampa
2727 W. Dr. M.L.K Jr. Blvd
Suite 690
Tampa, FL 33607
813-354-0100

St. Petersburg
4021 Central Ave, Suite C
St. Petersburg, FL 33713
727-323-9500

Brandon
620 Oakfield Dr.
Brandon, FL 33511
813-684-5525